

## Gebruiksaanwijzing

### Classificatie: Klasse 1 Medisch hulpmiddel - Apparaten voor eenmalig gebruik

MFS001 Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple  
MFS002 Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

GMDN Code	GMDN Term	Basic UDI-DI	Medical Device	MD Class
35702	Dental Abrasive Strip, single use	5051717MF02UB	Maxflex Strips	I

De gebruiksaanwijzing zijn uitsluitend bedoeld voor medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik en hebben betrekking op de producten, die in de desbetreffende productgroepschema's zijn vermeld.

Maxflex-strips worden door de kaakchirurg gebruikt voor het afwerken en polijsten van composietrestauraties. De strips worden geproduceerd als 2 verschillende, met 4 verschillende korrels en ze leveren de beste prestaties wanneer ze onder lichte druk worden aangebracht.

#### STERILISATIE

- De strips hoeven niet te worden gesteriliseerd. De strips moeten in hun oorspronkelijke verpakking bij kamertemperatuur worden bewaard en tot het gebruik worden beschermd tegen stof en vocht.

#### OPSLAG

De strips moeten worden bewaard onder hygiënische standaards, schaaltes of andere geschikte recipiënten en ze moeten tijdens de opslag worden beschermd tegen stof, vocht en verontreiniging. Als de strips niet onmiddellijk worden gebruikt, is het raadzaam ze in hun oorspronkelijke verpakking te bewaren.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

- Producten die vervormd zijn, mogen niet worden gebruikt en moeten worden weggegooid.
- Gebruik de strips in de juiste volgorde, onjuiste procedures kunnen leiden tot een vermindering van de polijstkwaliteit.
- Draag een gezichtsmasker om biologische overdracht te voorkomen.
- Onjuist gebruik levert slechte resultaten op en verhoogt het risico. Deze producten mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden gebruikt.

#### DRUK

- Overmatige druk kan leiden tot warmteontwikkeling die de strip kan beschadigen.
- Overmatige druk kan oververhitting veroorzaken, waardoor de pulpa wordt beschadigd. In extreme gevallen kan het instrument zelfs breken.

## INSTRUCTIES
















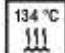

- 1) Plaats het centrale gedeelte (het gedeelte zonder slijpmiddel) van de afwerkstrip tussen de contactpunten.
- 2) Plaats het geselecteerde gedeelte van de strip over het af te werken composietoppervlak.
- 3) Pak beide uiteinden van de strip stevig vast en trek het schuurmiddel met een krachtige heen-en-weerbeweging over het composiet
- 4) Herhaal de procedure met een andere kwaliteit van de strip.
- 5) Gooi de strip weg.
- 6) Herhaal stap 1-5 met de Stoddard polijststrips.

## WEGGOOIEN VAN VERSLETEN INSTRUMENTEN

- Gebroken en verkeerd gevormde strips kunnen verwondingen veroorzaken.

## VEILIGHEIDSMATREGELEN

Deze tandheelkundige instrumenten zijn ontwikkeld en vervaardigd voor hun specifieke tandheelkundige chirurgische toepassing. Onjuist gebruik kan weefsel beschadigen, vroegtijdige slijtage veroorzaken, het instrument vernietigen en gevaar opleveren voor de gebruiker, de patiënt of derden.

	Manufacturer		Importer		Medical Device		NB Number
	Date of manufacture		Instructions for Use		Autoclave		Use by date
	Authorised Representative		Lot number		Quantity		Single use only - do not re-use
	Distributor		Product Reference		Eye Protection		Keep away from sunlight
	(01) 05051717145268 (10) 123456 (17) 260920	UDI	(01) GTIN / UDI-DI (10) PI (LOT No.) (17) PI (Expiry Date)				