



EC REP

Stoddard ApS, Moellegade 32  
8000 Aarhus C, Denmark



CH REP

EUMEDIQ AG, Grafenauweg 8,  
6300 Zug, Switzerland

## Användarinstruktioner

### Klassifikation: Klass 1 Medicinska apparater – för engångsbruk

GMDN Code	GMDN Term	Basic UDI-DI	Medical Device	MD Class
35702	Dental Abrasive Strip, single use	5051717MF02UB	Maxflex Strips	I

MFS001 Maxflex Strip – coarse/medium grit, blue/purple

MFS002 Maxflex Strip – fine/ultra-fine grit, pink/white

Grit Size	FEPA Ref	Size (Micron)	Colour
Coarse/Medium	F180	63	Blue
	F320	29.2	Purple
Fine/Ultra-fine	F400	17.3	Pink
	F800	6.5	White

Användarinstruktioner för medicinska apparater avsedda endast för engångsbruk som innefattar de produkter som listats i relevant produktgruppsschema.

#### AVSEDD ANVÄNDNING OCH INDIKATIONER

Maxflex Strips används av tandläkaren för finish och polish av kompositlagningar.

Dessa tillverkas som 2 olika band som består av 4 olika sandgrovlekar och de ger bästa prestandan när de appliceras under lätt tryck.

#### STERILISERING

- Banden kräver inte någon sterilisering. Banden ska förvaras inuti originalförpackningen vid rumstemperatur och skyddas mot damm och fukt tills de ska används.

#### FÖRVARING

Banden ska förvaras hygieniskt i luftiga hyllor, ställ eller andra lämpliga behållare och de måste skyddas mot damm, fukt och kontaminering under lagring. Om banden inte används genast, rekommenderas att man förvarar dem inuti originalförpackningen.

#### KORREKT ANVÄNDNING

- Produkter som är deformerade ska inte användas och måste omhändertas.
- Använd banden i rätt ordningsföljd, icke-korrekt procedur kan resultera i en försämrad poleringskvalitet.
- Bär ansiktsmask för att förhindra biologisk överföring.
- Icke-korrekt användning ger dåligt resultat och ökar risken. Dessa produkter ska endast användas av utbildad personal.
- Håll torrt
- Håll dig borta från solljus

## Instructions for Use

### TRYCK

- Onödigt hårt tryck måste alltid undvikas.
- Överdrivet tryck kan förorsaka överhettning som kan skada bandet.

Överdrivet tryck kan förorsaka överhettning, vilket skadar pulpan. I extrema fall kan även instrumentet brytas av.

### INSTRUKTIONER

- 1) Sätt dit den centrala delen (området som inte slipar) av bandet mellan kontaktpunkterna.
- 2) Positionera den valda delen på bandet över kompositytan som ska slipas.
- 3) Fatta ordentligt tag om båda ändarna av bandet och dra den slipande delen över kompositen med en kraftfull, bakåt- och framåtrörelse
- 4) Repetera proceduren genom att använda en annan grad på bandet.
- 5) Släng bandet.
- 6) Repetera steg 1-5 med Stoddards poleringsband.

### OMHÄNDERTA UTSLITNA INSTRUMENT

- Avbrutna och icke-korrekt formade band kan förorsaka skada.

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Dessa tandvårdsinstrument har tagits fram och tillverkats för specifika tandkirurgiska applikationer. Felaktig användning kan förorsaka skada på vävnad, förorsaka förtida förslitning, förstöra instrumentet och försätta operatör, patient eller tredje part i fara.

### VARNINGAR

Använda roterande instrument måste anses som kontaminerade och lämpliga handhavandeanvisningar ska vidtas under användningen. Handskar, ögonskydd och ansiktsmask ska bäras. Andra åtgärder kan krävas vid specifika infektioner eller korskontamineringsrisk föreligger från patienten.

### KONTRAINDIKATIONER

Inga kända kontraindikationer.



Tillverkare



Importör



Distributör



NB-nummer



Tillverkningsdatum




Instruktioner för användning



Kvantitet



Använd efter datum

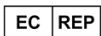

Auktoriserad Representant



Partinummer



Ögonskydd



Håll torrt



Medicinsk Utrustning



Produktreferens



Håll dig borta från solljus



Endast engångsbruk – återanvänd inte



(01)05051717145268  
(10) 123456  
(17) 260920

UDI

(01) GTIN / UDI-DI  
(10) PI (LOT No.)  
(17) PI (Expiry Date)



Unik enhetsidentifierare